

Behelfs-Mund-Nasen-Maske aus 100% Baumwolle

Washbar bei 60 Grad. Durch die Wäsche können die Farben etwas ausbleichen und das Gummi kann an Spannkraft verlieren.

Durch die Falten passt sich die Maske allen Gesichtsformen und Größen an. Zweilagig mit Öffnung für einen Filter. Gummiband mit Knoten individuell verstellbar. Mit Öffnung für einen Nasenbügel.



Diese Behelfs-Mund-Nasen-Maske ist kein Medizinprodukt.

Die Maske schützt dich nicht vor Viren.

Aber du reduzierst damit die Verteilung von Tröpfchen und zeigst deinem Gegenüber, dass du Rücksicht nimmst.

Folgende Hinweise sind **Empfehlungen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte** (Quelle: bfram.de)

Hinweise für Anwender zur Handhabung von „Community-Masken“

- Die Masken sollten nur für den privaten Gebrauch genutzt werden.
- Die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI, www.rki.de) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA, www.infektionsschutz.de) sind weiterhin einzuhalten.
- Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden.
- Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. Die Hände sollten vorher gründlich mit Seife gewaschen werden.
- Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.
- Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.
- Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht werden.
- Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerrhaltig. Um eine Kontamination der Hände zu verhindern, sollte diese möglichst nicht berührt werden.
- Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20-30 Sekunden mit Seife).
- Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden.
- Masken sollten nach einmaliger Nutzung idealerweise bei 95 Grad, mindestens aber bei 60 Grad gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden.